


# NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU LETNÍ ZÁBAL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ NA KRK

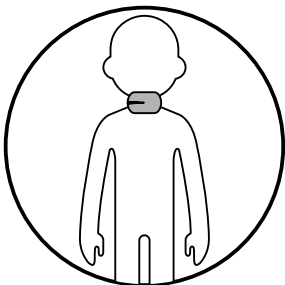

## K ČEMU JE ZÁBAL URČEN?

- Krytí krční páteře při letním a zimním sportu
- Při běžném nošení v prostorách s klimatizací
- Fixace krční páteře
- Funkce na bázi Priessnitzova zábalu (úleva při běžném bolení a škrábání v krku jako je angína, dětská laryngitida)

## Před použitím výrobku čtěte pozorně tento příbalový leták.

Inspirovali jsme se **Priessnitzovým zábalem** - tradicí ověřeným a osvědčeným přírodním postupem, který používaly již naše babičky od dob jeho objevení Vincenzem Priessnitzem (v 1. pol. 19. století), zakladatelem tzv. hydroterapie. Tato prověřená procedura vede ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím se zrychlují hojivé procesy v těle.

1. Vnitřní odnímatelný díl (obklad) zábalového pásu vyjměte a namočte do studené vody (teplotu vody je důležité zvolit podle stavu pacienta - u dětí a oslabených, či vyhublých pacientů volíme méně studenou vodu).
2. Vyždímaný obklad vložte zpět do zábalového pásu.
3. Pásem obejměte postižené místo a upevněte suchým zipem. Zábal by měl dobře přilnout.

## Zábal aplikujte vždy přímo na pokožku, přičemž dbejte těsného přilnutí.

### Délka použití zábalu:

Zábal nechte působit 4 – 8 minut. Opakujte do odeznění potíží, případně se poradte se svým lékařem.

### Suchý zábal doporučujeme použít:

**Krytí krční páteře při letním a zimním sportu, při běžném nošení, při průvanu a nastydnutí**

1. Vnitřní vyjímatelnou část zábalu ponechte v tomto případě stranou.
2. Zábal oviňte kolem krku, upevněte pomocí suchého zipu.

Nenechte nic náhodě a o použití zábalového pásu Mamavis se případně poradte s Vaším lékařem. Prosíme, dodržujte pokyny v příbalovém letáku.

**Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu [www.mamavis.cz](http://www.mamavis.cz) včetně instruktážních videí.**

Výrobek je chráněn úřadem průmyslového vlastnictví. Jeho výroba bez souhlasu majitele patentu je protizákonná.

## ZÁBALY DLE VINCENZE PRIESSNITZE

### NÁVOD K ÚDRŽBĚ A OŠETŘENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS:

- Zábaly je možné prát v pračce při 40 °C a nechat volně uschnout (při sušení nenatahovat).
- Na materiálu nešetříme, proto by měl vydržet 3-5 let podle toho, jak často se bude zábal používat.

### PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ MAMAVIS DBEJTE TĚCHTO ZÁSAD:

- Ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost.
- Při praní ponechejte suché zipy na výrobku zapnuté, udržujte je nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci.
- Teplota praní nesmí překročit 40 °C.
- Výrobek chraňte před stykem s ostrými předměty.
- Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku, či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace.



#### Upozornění:

Přírodní zábal se nesmí přikládat na místa infikovaná záněty, špatně se hojící rány, nebo kožní nemoci (ekzém aj.).

**Dodržování výše uvedených zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.**

**Naše výrobky mají atesty pro děti mladší 3 let.**

Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

### SLOŽENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS:

- Vnější vrstva: 100 % bavlna
- Jádru: 60 % polyester, 15 % bavlna, 25 % polyuretan
- Vnitřní vrstva: 100 % bavlna
- Upínání: suchý zip
- Součástí většiny zábalů je vnitřní vyjímatelný díl ze 100% bavlny.

### Naše víceúčelové zábaly pomáhají při léčbě, rehabilitaci a relaxaci:

- Vrchní vrstva tvoří pás ze 100% bavlny a protialergického rouna.
- Střední vrstva je nepropustná část pásu umístěna mezi vrchní a spodní vrstvou. Zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.
- Spodní vrstva je tvořena odnímatelnou vložkou z tenkého savého materiálu.