


NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU ZNAČKY MAMAVIS® VÍCEÚČELOVÝ ZÁBAL PRO DOSPĚLÉ NA RAMENNÍ KLOUB

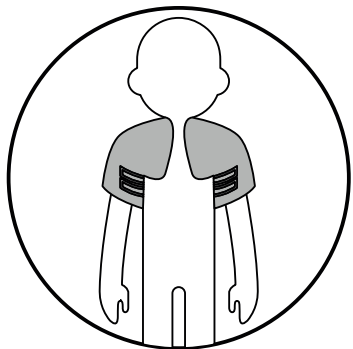

K ČEMU JE ZÁBAL URČEN?

- Účinně pomáhá při revmatických potížích
- Pomáhá při nachlazení
- Slouží k prohřátí krční páteře a ramen
- Pomáhá při bolestech ramenního kloubu a zad v oblasti šíje a lopatek
- Slouží k doléčení poúrazových a pooperačních stavů

Před použitím výrobku čtěte pozorně tento příbalový leták.

Inspirovali jsme se **Priessnitzovým záballem** - tradicí ověřený a osvědčený přírodní postup, který používaly již naše babičky od dob jeho objevení Vincenzem Priessnitzem (1799–1851), zakladatelem tzv. hydroterapie. Tato prověřená procedura vede ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím se zrychlují hojivé procesy v těle.

Zábal ramenního kloubu Mamavis obsahuje celkem tři vyjimatelné vnitřní díly – 2 x rukáv, 1 x díl na horní část zad a šíji.

Použít můžete buď všechny tři díly současně, nebo třeba jen jeden obklad. Záleží na typu potíží a na vlastním uvážení.

1. Vnitřní vyjimatelné díly namočte do studené vody a důkladně vyždímejte (teplotu vody je důležité zvolit podle stavu pacienta - pokud je člověk velmi oslabený, nebo vyhublý, zvolte méně studenou vodu).
2. Rukávy navlékněte na ruce až po ramena, třetí díl provlékněte pod pásky uvnitř zábalu, nebo rovnou přiložte na vrchní část zad.
3. Následně aplikujte zábal nejdříve kolem jedné paže a upevněte pomocí suchého zipu. Poté postup opakujte i na druhé paži a opět upevněte.

Pro lepší představu vlastní aplikace doporučujeme shlédnout foto návod na našem e-shopu www.mamavis.cz – Zábal na ramenní kloub.

Zábal aplikujte vždy přímo na pokožku, přičemž dbejte těsného přilnutí.

Délka použití zábalu:

Zábal nechte působit 20–60 minut. Opakujte do odeznění potíží, případně se poradte se svým lékařem.

Nenechte nic náhodě a o použití zábalového pásu Mamavis® se případně poradte s Vaším lékařem.
Prosíme, dodržujte pokyny v příbalovém letáku.

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu www.mamavis.cz včetně instruktážních videí.

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu na našem e-shopu www.mamavis.cz včetně instruktážních videí.

Ti, kteří znají léčebný účinek přírodních léčiv jako jsou byliny apod., mohou namáčet vyjimatelný obklad v bylinné lázni, případně potříft bylinnými mastmi, tvarohem apod.
Tato aplikace je doporučena pouze zkušeným a znalým správného postupu.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A OŠETŘENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:

- Zábál je možné prát normálně v pračce při 40 °C a nechat volně uschnout (při sušení nenatahovat).
- Na materiálu nešetříme, proto by měl vydržet 3-5 let podle toho, jak často se bude zábál používat.

PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ MAMAVIS® DBEJTE TĚCHTO ZÁSAD:

- Ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost.
- Při praní ponechejte suché zipy na výrobku zapnuté, udržujte je nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci.
- Teplota praní nesmí překročit 40 °C.
- Výrobek chraňte před stykem s ostrými předměty.
- Při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku, či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace.

**Upozornění:**

Přírodní zábál se nesmí přikládat na místa infikovaná záněty, špatně se hojící rány, nebo kožní nemoci (ekzém aj.).

Dodržování výše uvedených zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

Naše výrobky mají atesty pro děti mladší 3 let. Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

SLOŽENÍ ZÁBALŮ MAMAVIS®:

- Vnější vrstva: 100 % bavlna
- Jádro: 50 % polyester, 25 % bavlna, 25 % polyuretan
- Vnitřní vrstva: 100 % bavlna
- Upínání: suchý zip
- Součástí většiny zábalů je vnitřní vyjímateľný díl ze 100% bavlny.

Naše víceúčelové zábaly pomáhají při léčbě, rehabilitaci a relaxaci:

- Vrchní vrstva tvoří pás ze 100% bavlny a protialergického rouna.
- Střední vrstva je nepropustná část pásu umístěna mezi vrchní a spodní vrstvou. Zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.
- Spodní vrstva je tvořena odnímatelnou vložkou z tenkého savého materiálu.